

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO

AGULHA ANGIOGRÁFICA DE PEÇA ÚNICA COM ASA ENCAIXÁVEL


I. INDICAÇÕES

Agulha angiográfica de peça única com asa encaixável é indicada para criar uma entrada no vaso para a introdução de fio-guia. Este produto é composto pela haste/cânula, canhão transparente, bainha e asa encaixável.


II. INSTRUÇÃO DE USO

Procedimento cirúrgico recomendado (técnica de Seldinger):


1. Faça uma punção venosa introduzindo a agulha num ângulo entre 30 a 45 graus medialmente

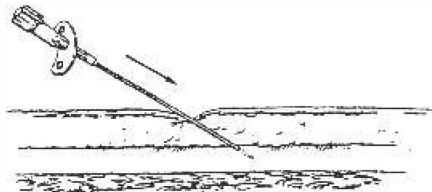


2. O estilete é removido e fluxo de sangue livre é observado; o ângulo da agulha é então diminuído

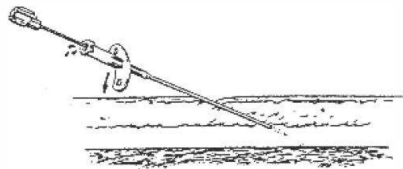

3. A ponta do fio guia é passada através da agulha até o vaso sanguíneo

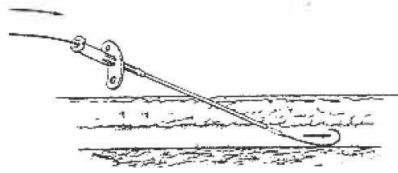

4. A agulha é então removida enquanto o local é pressionado

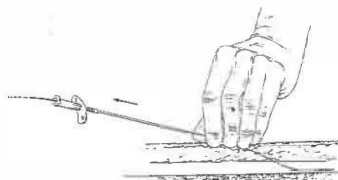

III. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e não exposto a luz solar. Não utilize se a embalagem estiver danificada.









IV. CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Seguir os procedimentos padrões da instituição quanto ao descarte.

V. ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- Não utilize se a embalagem estiver danificada
- Produto de uso único – PROIBIDO REPROCESSAR

Símbolos dos rótulos e embalagem

	Estéril por óxido de etileno
	Não reutilizar
	Não re-esterilizar
	Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada
	Fabricante
	Número de catálogo
	Número de lote
	Prazo de validade

**Fabricante:**

Cordis US Corp. (também conhecida como Cordis Corporation)
14021 NW 60th Avenue, Miami Lakes, Florida – Estados Unidos da América

Cordis Cashel
Cashir Road, Cashel, County, Tipperary, Irlanda
País de Origem: Japão

Detentor da Notificação:

CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA.
Rua Ponta Porã, nº 371, Vila Ipojuca
São Paulo - SP – 05.058-000
CNPJ: 27.548.227/0001-22
Responsável Técnico: Alexandra Peixoto Demori Lima CRF/SP 42520
Notificação ANVISA nº:81576629015

Produto estéril por óxido de etileno.

PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

Observação: Este modelo de instrução de uso é aplicado aos seguintes produtos:

Modelo	Descrição
502652	Agulha angiográfica de peça única com asa encaixável, 70 mm, 18G
502654	Agulha angiográfica de peça única com asa encaixável, 70 mm, 19G
502655	Agulha angiográfica de peça única com asa encaixável, 50 mm, 20G